



Ogawa is grateful to have received these awards:



服务热线 400-885-9880

奥佳华中国官网: [www.ogawaworld.net.cn](http://www.ogawaworld.net.cn)

全球销售网点: 中国 马来西亚 澳大利亚 中国香港 新加坡 沙特阿拉伯 缅甸 印度尼西亚 越南等  
制造商: 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 地址: 厦门市思明区前埔路168号

User Manual 使用手册



## 使用手册

在使用前请阅读所有的使用说明

## OG-7501天行者按摩椅

感谢您购买奥佳华OG-7501天行者按摩椅，使用前请仔细阅读操作手册，并特别注意安全事项，以便正确操作和使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作方式，请在阅毕后妥为收藏，以便日后参考查询。

目录		安全提示
		产品简介
		使用准备
		操作说明
		按摩指南
		产品规格
		故障排除
		产品保养
		联络我们

## 安全提示

### 注意事项

使用产品前，请仔细阅读说明书，并妥善保管以备日后参考。

### 注意

如果出现以下状况，请在使用本产品前咨询您的医生：

- 使用心脏起搏器或类似的植入式医疗设备
- 患有心脏疾病
- 患有劳损性背痛
- 骨骼脆弱或有损伤，尤其是背部骨骼
- 外科手术之后
- 怀孕期间或分娩后不久
- 患有恶性肿瘤
- 患有骨质疏松症
- 患有血液循环问题或血栓症
- 患有皮肤感染
- 正在接受治疗或辅助治疗
- 肢体存在异常现象
- 曾经因为意外或疾病而造成的脊椎病或脊骨损伤

### 危险


- 切勿让水进入产品或溅到产品表面。
- 水与电接触是危险的，因此勿将产品放在潮湿的环境中使用（如在浴室中，或是淋浴间、游泳池旁使用）。

### 警告


1. 将产品接通电源前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
2. 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
3. 为防止触电危险，一定不要打开产品外套。
4. 本产品不适合由肢体不健全，感觉或精神有障碍的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们在使用产品时进行监督或指导。
5. 如果产品或电源软线损坏，为避免危险，不要自己维修产品，必须由相关的专职人员来处理，否则产品质量维修保证将无效。
6. **18周岁以下人士不宜使用本产品。**应照顾好儿童，确保他们不会把本产品当玩具。
7. 如果产品发出异常的噪声，应关闭产品并立即断开产品的电源连接，并联系经授权的顾客服务中心。
8. 请勿在外罩损坏或出现机械或电子故障时使用本产品，应当立即与经授权的售后服务中心联系。
9. 只能按照本用户手册中的说明放置本产品。
10. 请勿在潮湿和高温度的房间内或发热物体（例如取暖器、火炉等）旁边使用本产品。
11. 在使用本产品之前或使用过程中，请勿将医用或化妆用乳霜涂抹在产品或您的背部上。
12. 请勿震动或使产品跌落。
13. 不要破坏、弯曲、牵拉、拧结或困扎电源软线。损伤的电源软线可导致火灾或触电。
14. **器具具有发热表面，对热不敏感的人使用需注意。**

# 产品简介


## 按摩椅

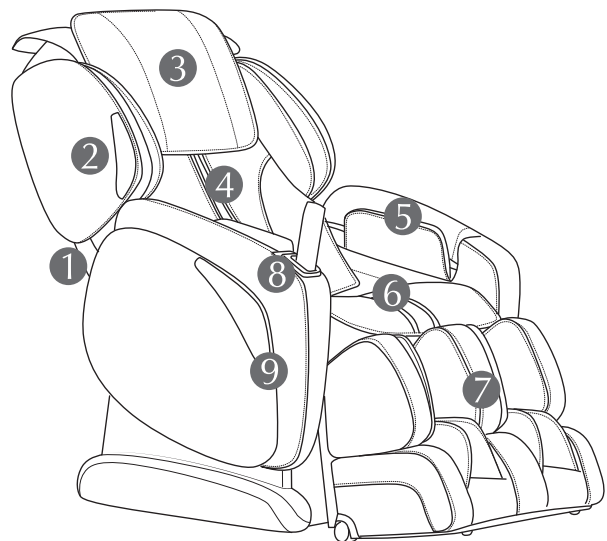

- ① 椅背
- ② 肩部
- ③ 枕头
- ④ 披风
- ⑤ 扶手
- ⑥ 坐垫
- ⑦ 小腿组件
- ⑧ 控制器插槽和USB充电口
- ⑨ 侧板
- ⑩ 肩部2组气囊
- ⑪ 手臂4组气囊+背部2组气囊
- ⑫ 腿部12组气囊

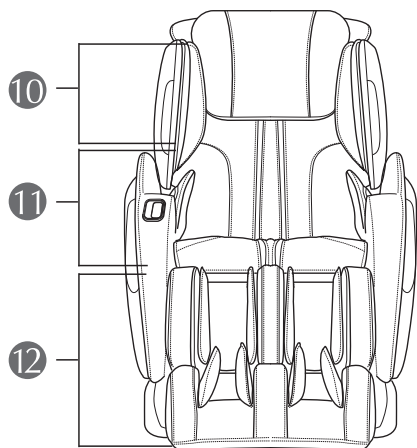

## 控制器

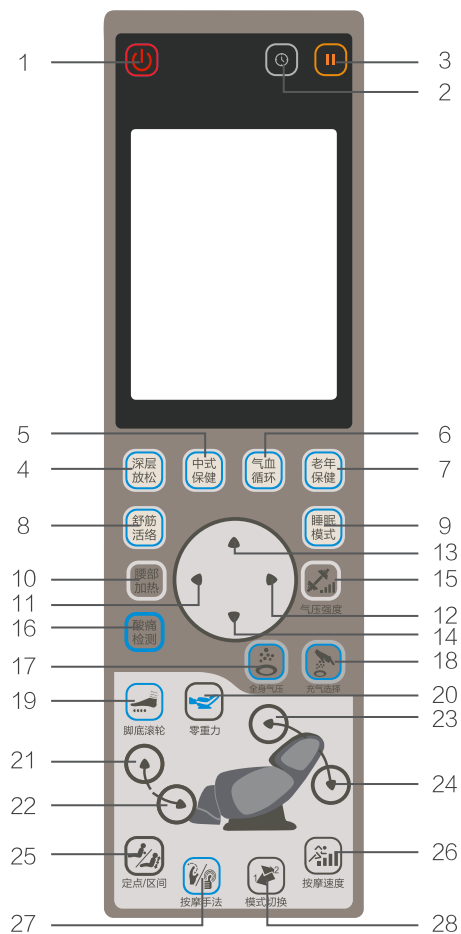


- |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.开 / 关      | 13~14.上背位置调节 | 20.零重力       |
| 2.定时         | 15.气压强度      | 21~22.升腿/降腿  |
| 3.暂停         | 16.酸痛检测      | 23~24.升背/倒背  |
| 4~9.全身自动按摩程序 | 17.全身气压      | 25.定点 / 区间   |
| 10.腰部加热      | 18.充气部位选择    | 26.按摩速度调节    |
| 11~12.按摩宽度调节 | 19.脚底滚轮      | 27/28.按摩手法选择 |

## 使用准备


### 零靠墙

此产品拥有零靠墙功能，只需保证在安放按摩椅时椅背与墙壁保持120mm的距离（脚轮与墙壁距离460mm）即可大大节省放置空间，如图所示：

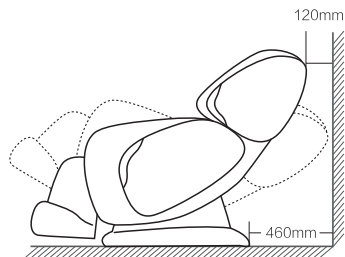

### 移动按摩椅

- 将按摩椅关机，确认小腿组件完全收回，把电源插头从插座中拔出。
- 将按摩椅往后倾斜45°，以方便在室内自由移动按摩椅。

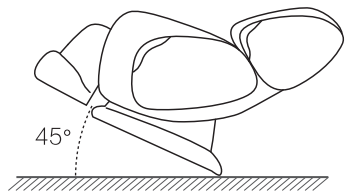

注意：

- 在移动按摩椅前一定要把小腿组件完全收回，若不遵守，在移动过程中收回小腿组件有可能导致受伤的情况。
- 当有人坐在按摩椅上时，请不要移动椅子。
- 使用和移动按摩椅时为避免对木地板以及容易损伤的地面造成损伤，最好在按摩椅底下铺上垫子。


### 肩宽调整

本产品肩部宽度可根据个人体型自行调整。

使用本产品时如果按摩椅肩部气囊无法按压到肩膀，可握住按摩椅肩部往内按压，即可缩小按摩椅两侧肩部之间的宽度；

如果感觉按摩椅肩部气囊太紧，或两侧肩部距离太小无法躺入，可握住按摩椅肩部往内再次按压，即可恢复到最宽位置。

注：肩部宽度1到3档循环调节。

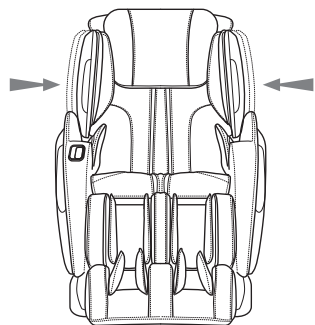

## 操作说明

### 使用本产品

- 将电源插头插入插座，将按摩椅后下部电源开关按至“1”的位置。
- 按电源键开始整机按摩功能。
- 按摩过程结束之后，按电源键关闭整机按摩功能，将按摩椅后下部电源开关按至“0”的位置，并将电源插头从插座中拔除。

### 功能说明

#### 1、开/关【按键1】

整机按摩功能启/停键

产品处于待机模式时按一下此键开机，手控器屏幕显示；此时按下任何按摩功能键开始接受按摩并启动定时功能。

产品处于运行状态时按一下此键关机，按摩轮、靠背和小腿恢复到原有位置，开关键指示灯闪烁。

#### 2、定时【按键2】

定时时间选择键

当按摩程序启动时，定时功能自动设为15分钟，每按一次定时键，定时时间将按“20>25>30>5>10>15>20”循环。

#### 3. 暂停【按键3】

暂停功能选择键

如需暂停按摩功能，请按暂停键，此时所有按摩功能都将暂停，包括定时功能，再按一下此键则继续暂停前的按摩功能及定时功能。

## 全身自动按摩功能

当6个全身自动按摩程序中任意一个启动之后,将对肩部高度自动进行检测以调整适应不同身形的按摩行程。也可根据需要对按摩位置进行手动调整。

## 4、 深层放松【按键4】

通过对颈部、肩部、腰部和臀部等部位的肌肉进行全方位按摩,缓解一天工作的压力。

## 5、 中式保健【按键5】

以各种敲击手法配合气囊按摩针对背部、手臂和腿部等部位进行放松按摩,舒缓身心。

## 6、 气血循环【按键6】

通过对腰部、臀部、大腿等多套组合气压按摩,有助于舒缓身心,适合工作之余适当放松。

## 7、 老年保健【按键7】

以轻揉轻拍的按摩手法为主,此程式适合老年人按摩。

## 8、 舒筋活络【按键8】

此程式以拉筋为主,主要针对手部、背部、大腿和小腿等部位进行伸展拉伸按摩。

## 9、 睡眠模式【按键9】

以轻快多样的敲击手法对全身进行按摩,动作温和,有助于夜晚睡眠。

## 10. 腰部加热【按键10】

腰部加热功能启动/停止键

按此按钮启动腰部加热功能,再按此按钮停止加热功能。

## 11. 宽度调节【按键11/12◀/▶】

捶打式、推拿式及指压式按摩功能宽度调节键◀▶—3种宽度可调

在启动捶打式、推拿式或指压式按摩后按此二按键可对按摩头进行宽度调整,向左变窄,向右变宽,共三档(宽、中、窄)可调。

## 12. 上背位置调节【按键13/14▲/▼】

上背按摩位置选择键

当手动或者自动扫描到的行程无法满足个人需求时,可以再按摩椅发出提示音的10秒内,持续按住“▲”或“▼”键,按摩滚轮将根据您的需求上行或下行,至事宜的位置释放此键,即可锁定按摩行程,以达到微调的目的。

注意:在定点或者区间按摩时,也可通过这两键调节按摩位置。

## 13. 气压强度【按键15】

气压按摩强度调节键—5种强度可调节。

自动或手动气压按摩模式下,每按一次此键,将对气压按摩力度进行由小到大循环调节。

## 14. 全身气压【按键17】

全身气压按摩功能启/停键

开机后,按一下此键开启肩部、腰部、手部和腿部全方位的气压按摩,再按一下,取消全身气压按摩。

## 15. 充气选择【按键 18】

气压按摩部位选择键

按此键可对气压按摩部位进行选择, 每按一次此键, 选择气压按摩部位顺序: 腿部>手部>腰部>肩部>关闭。

## 16. 酸痛检测【按键 16】

酸痛检测选择键

按此键可侦测背部酸痛点数, 通过两边扶手酸痛感应片传输到按摩椅电脑系统, 按摩椅系统根据收集到的酸痛点进行针对按摩。

注: 选择酸痛检测之前, 请体验者坐上按摩椅并按下此键, 自然和轻松地握好左右两侧扶手上酸痛感应片, 手控器发出连续“滴、滴、滴”响声表示开始酸痛检测, 检测到酸痛点时会发出“滴”的提示音, 直到手控器“滴”提示声停止, 表示酸痛检测完成并开始按摩(如当人体精力佳的情况下, 酸痛检测系统侦测不到人体的点位数, 手控器不会显示点位数在相应位置, 手控器检测过程中不会发出声音直到最后响一声, 系统会输出全身按摩程序)。

## 17. 脚底滚轮【按键 19】

脚底滚轮按摩功能启/停键

按一次此键, 启动脚底滚轮按摩功能, 滚轮开始对脚底进行按摩, 再按一次, 则停止脚底滚轮按摩功能。

## 18. 零重力【按键 20】

零重力功能启/停键

按此按键可自行调节椅背和小腿角度, 达到最舒适的零重力位置。再按一次此键, 可恢复到开机角度。

## 17. 升腿/降腿【按键 21/22】

小腿角度选择键

通过这两个控制键可调节小腿角度, 按一次升腿或降腿控制键, 小腿角度将

进行调节。当调节到适当位置时, 再按一次升腿或降腿中的相应按键即可定位。

注: 小腿设计弹簧伸缩, 可满足消费者腿部不同长度的, 体验过程达到最佳状态。

## 18. 升背/倒背【按键 23/24】

靠背角度选择键

通过这两键可以调节椅背角度, 按一次升背/倒背, 按摩椅背角度将进行调节, 当调节至适当位置时, 再按一次升背/倒背相应按键即可定位。

## 19. 定点/区间【按键 25】

背部定点/区间接按摩选择键

在所需按摩的位置按一下此键将对该按摩位置提供集中地定点按摩。再按一次此键切换至背部区间按摩, 在原点上下 8CM 区间内提供按摩。再次按一下此键则解除背部“定点/区间”按摩功能。

## 20. 按摩速度调节键【按键 26】

在按摩速度调节键—5 档可调

按摩功能启动后, 每按一次此键, 按摩速度将由慢到快循环调整。

## 21. 手动模式【按键 27】

背部按摩手法选择键

按一次此键启动背部揉捏按摩功能, 每按一次此键将按顺序切换“捶打 > 瑞典式 > 指压式 > 揉敲式 > 推拿式 > 停止”等按摩手法。


## 22. 模式切换【按键 28】

在手动功能启动时, 按此键可在手动按摩手法模式 1 与模式 2 之间切换。

## 按摩指南

### 按摩角度

“零重力”[按键 20] 按键可以方便快捷地调整按摩的状态，提供最佳的按摩角度。按一次“零重力”键，则进入舒适的零重力按摩角度，再按一次回复开机角度。如下图所示：

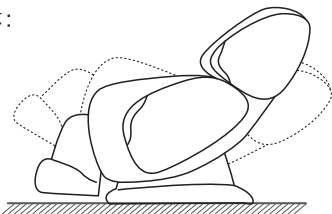

注意：零重力状态比普通按摩姿势提供更舒适的按摩角度

### 按摩力度

可使用“气压强度”[按键 15] 按键调节气压按摩的按摩力度（5档可调）。调节背部（椅背处的按摩轮）的按摩力度时，可使用“按摩速度”[按键 26] 按键来调节（5档可调）。

若感觉背部按摩力度太大可将腰枕放在后背，反之可取掉腰枕。

### 颈部按摩

为了使颈部得到更深层次的按摩，可将小枕头取下，只用大枕头，此时颈部按摩力度较强；也可将大小枕头都取掉，此时颈部按摩力度最强。这两种方法可根据自身的需要选择。

### 拉筋按摩

在“舒筋活络”[按键 8] 的自动程式进行拉筋按摩时，应该保持正确坐姿，双手应放置包裹在手臂气囊内。

### USB充电

本产品增加USB充电接口，可为手机或平板电脑提供临时充电功能。

注意：USB充电接口输出参数：5V，500mA。

### 肩部3档棘轮调节

肩部位置（左右侧）均有设定3档棘轮调节功能，可根据体验者肩部宽度大小进行相对应的调节，以便可体验到肩部气囊按摩较佳效果。

注意：调节肩部棘轮时，请勿把手部或手指深入肩部内部夹角处，防止夹伤。

## 产品规格

项目名称	规格内容
产品名称	天行者
产品型号	OG-7501
额定电压	220-240V~
额定频率	50/60Hz
额定功率	250W
自动定时	15分钟
尺寸(长x宽x高)	直立尺寸: 1610x780x1200(mm)
	平躺尺寸: 1980x780x860(mm)
重量	106kg(净重)
	127kg(毛重)
线长	手控器线长: 1.5米
	电源线长: 1.8米
使用环境	环境温度: 10~40° C
	环境湿度: 30~85RH
储存环境	环境温度: 20~60° C
	环境湿度: 30~85RH
安全装置	具有过热、过压和过流保护
执行标准	GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008



## 故障排除

本章归纳了本产品在使用时最常遇到的问题。如果您无法用下面的信息解决问题，请与顾客服务中心联系。

如果您遇到列表中未提及的问题，应先尝试下列步骤：

1. 关闭产品的电源，从插座中拔下电源插头。
2. 让本产品保持关闭状态60分钟。
3. 重新将插头插入电源插座并开启本产品。

如果问题依然存在，请与您所在地区的客户服务中心联系。

状 况	可能原因	解决方法
产品不能运作	产品电源插头没有插上。	检查产品所示的电压是否与当地的电压相符合。将电源插头插入插座。
	产品刚刚完成15分钟按摩并自动切换至待机模式。	如果您想再按摩一次，请再次按下ON/OFF按钮。
	您已经连续使用本产品长达45分钟，导致过热保护装置切断了产品的电源。	重新使用本产品前，必须先把产品插头拔下并冷却60分钟。
	产品上放置的负荷过重（例如有人站在产品上或有重物放置在产品顶部）。	拔下产品电源插头。移除多余的重量（如果负荷仍在产品上）。请重新插入产品电源并将产品开启。
产品发热	您已经连续让本产品执行了45分钟按摩。	拔下产品电源插头并让其冷却。在每次使用之后，请拔下产品的电源插头。
有声音从产品中传出	此声音是由于产品的机械结构造成的。	此声音是正常的，并不代表产品出现故障。

## 产品保养

### 清洁

请不要使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

1. 将插头从电源插座中拔下。
2. 用干布清洁按摩椅、遥控器和电源线。
3. 请勿使用湿布或清洁剂。

### 存放

1. 将插头从电源插座中拔下。
2. 将本产品存储在远离日光照射的阴凉干燥处。
3. 请勿将重物压在本产品上。

注意：如果皮套损坏或机械故障，请停止使用本产品，并与您所在地区经授权的售后服务中心或客户服务中心询问。

---

## 联络我们

 **服务热线 400-885-9880**

**奥佳华智能健康科技集团股份有限公司**

XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP

地址：厦门市思明区前埔路168号

邮编：361008

总机：86-592-3795700

传真：86-592-5532788

官方网站：<http://www.easepal.com.cn>